



Поздравляем Вас с важным и ответственным шагом – приобретением медицинского генетического теста! Ваше решение заботиться о своем здоровье и получить дополнительную информацию о своей генетике говорит о стремлении к самосовершенствованию.

Мы уверены, что этот шаг поможет Вам лучше понять свое тело и принимать более осознанные решения в отношении своего здоровья. Генетические данные предоставляют ценную информацию, которая может помочь в предотвращении и раннем выявлении различных заболеваний.

Перед тем как сдавать тест, обратите пожалуйста внимание на несколько важных деталей:

1. Лучше всего тест сдавать утром до чистки зубов и натошак.
2. Никакой специальной подготовки не требуется.
3. Открыв набор, вы увидите воронку и пробирку со стабилизирующим раствором. Пожалуйста, прикрутите воронку к пробирке, соберите слюну до отметки на пробирке. Закройте пробирку и убедитесь пожалуйста, что она плотно закрыта.
4. Достаньте пакет со дна коробки, положите в него пробирку и заклейте пакет. В пакете должна быть только пробирка.
5. До того, как передать набор в офис компании Tellmegen CA, вам нужно зарегистрировать ваш набор на сайте www.tellmegen.kz. Штрих код для регистрации вы можете найти на коробке с тестом, на пробирке, на инструкции по сдаче. Создайте личный кабинет и введите штрих код в порядке «буква-цифра-буква-цифра». После регистрации, пройдите по ссылке в вашем почтовом ящике, чтобы ее активировать.
6. Результаты теста придут в ваш личный кабинет.

Тест очень объемный и информативный, поэтому мы не печатаем информацию, а оставляем ее в электронном виде. Тест автоматически обновляется. В случае, если вам понадобится расшифровка, пожалуйста обратитесь в место покупки теста и предоставьте результаты теста в формате PDF.

Желаем успешного исследования и полезных открытий о себе. Пусть результаты теста станут основой для более здорового и счастливого будущего.

С наилучшими пожеланиями,

TellmeGen CA

